



ISTRUZIONI PER L'USO

Kedjetäcket® - CONFORTINO HD

Confortino HD è un prodotto che si può usare in diversi modi, a seconda chi lo usa e di quale effetto si vuole ottenere.

ESEMPI DI UTILIZZO

- Diagnosi Neuropsichiatriche
- Malattie mentali
- Demenza
- Lesioni Cerebrali acquisite
- Malattie neurologiche
- Preoccupazioni e ansia
- Anoressia e Bulimia
- Normale invecchiamento
- Agitazione



PESO:

- 15 kg

Se si desidera un peso diverso, è possibile di fare un ordine personalizzato.

MISURA:

- 140 x 205 cm

DUE LATI:

La scelta del lato da mettere contro il corpo è individuale. Con il lato catene verso il corpo, si ottiene una pressione maggiore. Una stimolazione tattile superiore può dare un effetto calmante in più. Si deve provare con quale lato ci si trova meglio.



Kedjetäcket® HD deve sempre essere lavata nel sacchetto del bucato.



Selezionare il ciclo delicato, lavare al massimo a 60° C.



La trapunta è divisibile con una comoda cerniera



Non asciugare in asciugatrice, non lavare a secco



Kedjetäcket® HD è prodotto con materiali ignifughi. Il tessuto esterno è conforme alla norma SS-EN ISO 12952-1:2010.



Kedjetäcket® HD è un marchio CE.



Brevettato



La trapunta HD è un prodotto Svedese, confezionata a mano a Stenkullen

ATTENZIONE

La combinazione di una trapunta pesante e di una capacità polmonare debole dell'utente può compromettere la capacità respiratoria quindi l'utente deve essere monitorato durante l'uso della coperta.

Prendere in considerazione il rischio di inciampare se la trapunta si trova sul pavimento.

La trapunta contiene catene in acciaio. Se all'utente sono state impiantate apparecchiature sensibili al metallo (pace maker, ad esempio) è opportuno consultare il medico curante prima dell'uso.

SensiSereni

 **somna**[®]
www.somna.eu

Distributore:

SPE AB SensiSereni
Binnerbergstorp 1, SE 61031
Vikbolandet, Svezia
VAT SE 55679595501

Contatto Italia:

Birgitta Lindholm
tel. +39 3914241101
info@sensisereni.it
www.sensisereni.it

Fabbricante:

Somna AB
Panelvägen 16
SE-44361 Stenkullen, Svezia
info@somna.eu

20151011